

DE Montagehinweis zu Auflagern

EN Mounting instruction for bearings




Gültig für folgende Modelle/valid for the following models: Start M1, M2S, M2

Auflager austauschen

1. Das Seitenteil nach hinten schwenken.
2. Die Kreuzstrebe anfallen.
3. Die Zylinderschraube mit Innensechskant des Auflagers entfernen (siehe Abb. 1)
4. Das Auflager entnehmen und tauschen.
5. Das Auflager (siehe Abb. 2) am Rahmenrohr montieren. die Zylinderschraube mit Innensechskant wieder festziehen (siehe Abb. 1)

Change bearings

1. Swing the side panel backwards.
2. Fold the cross brace.
3. Remove the socket cap screw of the bearing (see Fig. 1)
4. Remove and replace the bearing.
5. Mount the bearing (see Fig. 2) on the frame tube. Retighten the socket cap screw (see Fig. 1).

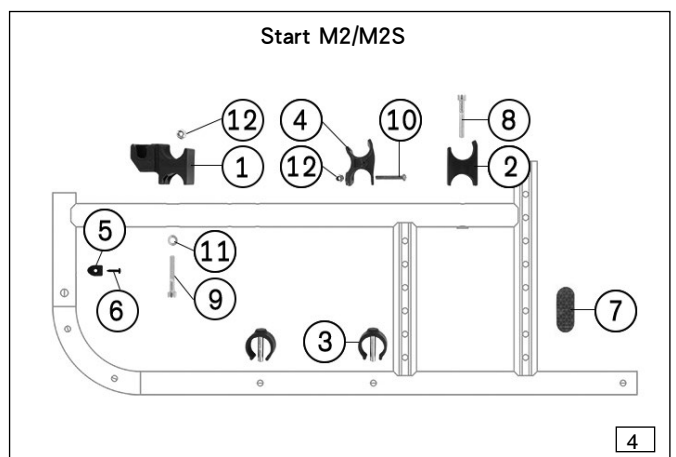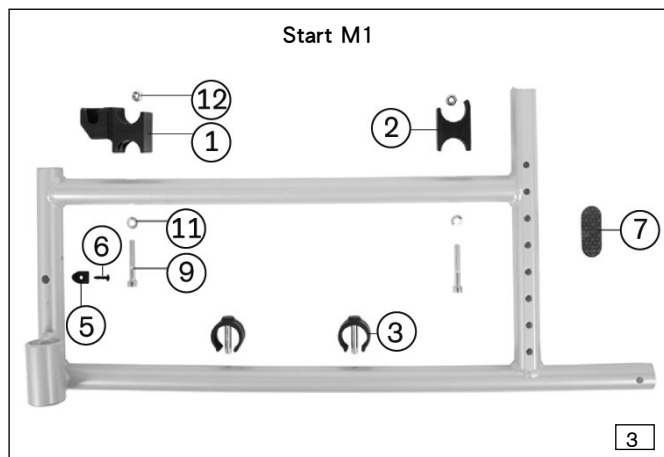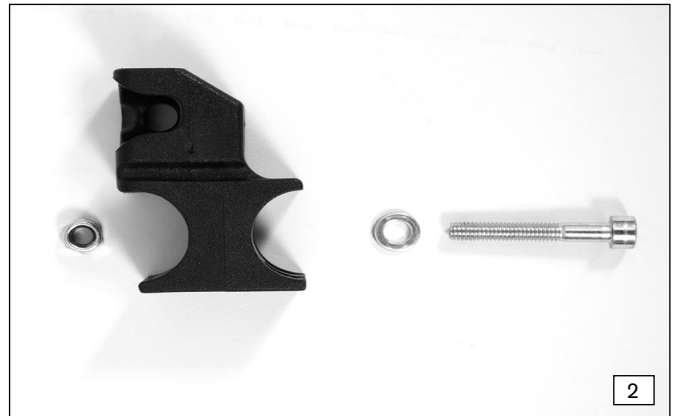

Pos.	Materialnr./Artno.	Beschreibung/Description	Anzahl/Pc.	Bemerkung/notice
M1 (480F74=2*); alle Sitzbreiten/all seat widths				
1	481A74=LT009	Sitzrohrauflager vorn/front seat tube bearing	1 St./Pc.	
1	481A74=RT009	Sitzrohrauflager vorn/front seat tube bearing	1 St./Pc.	
2	481A74=ST008	Sitzrohrauflager hinten/rear seat tube bearing	2 St./Pcs.	Version bis/until 31.12.2019
3	481A74=ST022	Klemme/clamp	4 St./Pcs.	
4	481A53=ST129	Sitzrohrauflager hinten/rear seat tube bearing	2 St./Pcs.	Version ab/from 01.01.2020
5	481B74=ST005	Fußrastenbegrenzung/footrest bound	2 St./Pcs.	
6	501B12=3.9X13	Linsen-Blechschrabe m.Kreuzschlitz/cross recessed pan head tapping screw	2 St./Pcs.	
7	481D00=ST302	Rückstrahler/reflector	2 St./Pcs.	
9	501T28=M6X40	Zylinderschraube DIN912,verzinkt/socket cap screw M6x40 DIN 912, galvanized	2 St./Pcs.	Version bis/until 31.12.2019 4 St./Pcs. Version ab/from 01.01.2020 2 St./Pcs.
10	501S72=M6X40	Linsenschraube/button head socket screw	2 St./Pcs.	Version ab 01.01.2020
11	507S32=6	Federscheibe DIN 137/spring washer DIN 137	2 St./Pcs.	Version bis/until 31.12.2019 4 St./Pcs. Version ab/from 01.01.2020 2 St./Pcs.
12	502S18=M6	Sechskantmutter selbstsichernd DIN 985/lock nut Nylon insert DIN 985	4 St./Pcs.	
M2S/M2 (480F74=3*); Sitzbreite/seat widths 38 cm - 50,5 cm; Sitztiefe/seath depth 40,5 cm - 45,5 cm				
1	481A74=LT009	Sitzrohrauflager vorn/front seat tube bearing	1 St./Pc.	
1	481A74=RT009	Sitzrohrauflager vorn/front seat tube bearing	1 St./Pc.	
2	481A74=ST008	Sitzrohrauflager hinten/rear seat tube bearing	2 St./Pcs.	
3	481A74=ST022	Klemme/clamp	4 St./Pcs.	
5	481B74=ST005	Fußrastenbegrenzung/footrest bound	2 St./Pcs.	
6	501B12=3.9X13	Linsen-Blechschrabe m.Kreuzschlitz/cross recessed pan head tapping screw	2 St./Pcs.	
7	481D00=ST302	Rückstrahler/reflector	2 St./Pcs.	
8	501T28=M6X30	Zylinderschraube DIN912,verzinkt/ socket cap screw DIN 912, galvanized	2 St./Pcs.	
9	501T28=M6X40	Zylinderschraube DIN912,verzinkt/socket cap screw DIN 912, galvanized	2 St./Pcs.	
11	507S32=6	Federscheibe DIN 137/spring washer DIN 137	2 St./Pcs.	
12	502S18=M6	Sechskantmutter selbstsichernd DIN 985/lock nut Nylon insert DIN 985	2 St./Pcs.	
M2S/M2 (480F74=3*; 480F74=4*); Sitzbreite/seat width 53 cm; Sitztiefe/seat depth 40,5 cm - 45,5 cm				
1	481A74=LT009	Sitzrohrauflager vorn/front seat tube bearing	1 St./Pc.	
1	481A74=RT009	Sitzrohrauflager vorn/front seat tube bearing	1 St./Pc.	
2	481A74=ST008	Sitzrohrauflager hinten/rear seat tube bearing	4 St./Pcs.	Version bis/until 31.12.2019 2 St./Pcs. Version ab/from 01.01.2020 4 St./Pcs.
3	481A74=ST022	Klemme/clamp	4 St./Pcs.	
5	481B74=ST005	Fußrastenbegrenzung/footrest bound	2 St./Pcs.	
6	501B12=3.9X13	Linsen-Blechschrabe m.Kreuzschlitz/cross recessed pan head tapping screw	2 St./Pcs.	
7	481D00=ST302	Rückstrahler/relector	2 St./Pcs.	
8	501T28=M6X30	Zylinderschraube DIN912,verzinkt/socket cap screw DIN 912, galvanized	2 St./Pcs.	
9	501T28=M6X40	Zylinderschraube DIN912,verzinkt/socket cap screw DIN 912, galvanized	4 St./Pcs.	Version bis/until 31.12.2019 2 St./Pcs. Version ab/from 01.01.2020 4 St./Pcs.
11	507S32=6	Federscheibe DIN 137/spring washer DIN 137	4 St./Pcs.	Version bis/until 31.12.2019 2 St./Pcs. Version ab/from 01.01.2020 4 St./Pcs.
12	502S18=M6	Sechskantmutter selbstsichernd DIN 985/lock nut Nylon insert DIN 985	4 St./Pcs.	Version bis/until 31.12.2019 2 St./Pcs. Version ab/from 01.01.2020 4 St./Pcs.
M2 (480F74=4*); Sitzbreite/seat width 53 cm; Sitztiefe/seat depth 48 cm - 50,5 cm				
1	481A74=LT009	Sitzrohrauflager vorn/front seat tube bearing	1 St./Pc.	
1	481A74=RT009	Sitzrohrauflager vorn/front seat tube bearing	1 St./Pc.	
2	481A74=ST008	Sitzrohrauflager hinten/rear seat tube bearing	2 St./Pcs.	
3	481A74=ST022	Klemme/clamp	4 St./Pcs.	
4	481A53=ST129	Sitzrohrauflager vorn/front seat tube bearing	2 St./Pcs.	Version ab/from 01.01.2020
5	481B74=ST005	Fußrastenbegrenzung/footrest bound	2 St./Pcs.	
6	501B12=3.9X13	Linsen-Blechschrabe m.Kreuzschlitz/cross recessed pan head tapping screw	2 St./Pcs.	
7	481D00=ST302	Rückstrahler/reflector	2 St./Pcs.	
9	501T28=M6X40	Zylinderschraube DIN912,verzinkt/socket cap screw DIN 912, galvanized	4 St./Pcs.	
10	501S72=M6X40	Linsenschraube/button head socket screw	2 St./Pcs.	Version ab/from 01.01.2020
11	507S32=6	Federscheibe DIN 137/spring washer DIN 137	4 St./Pcs.	
12	502S18=M6	Sechskantmutter selbstsichernd DIN 985/lock nut Nylon insert DIN 985	6 St./Pcs.	Version bis/until 31.12.2019 4 St./Pcs. Version ab/from 01.01.2020 6 St./Pcs.